



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen
rund um das Produkt - per E-Mail: service@mycare.de oder per Telefon:
0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: www.mycare.de

[Zum Produkt »](#)



Für mehr Liebe, Lust & Leidenschaft



HYDRO

OHNE KONSERVIERUNGS-
MITTEL
Gynäkologisch getestet*



BIO Gleitgel

VEGANES GLEITGEL
Dermatologisch getestet*



GEL+

SCHÜTZE UND PFELE
MIT BIO ALOE VERA
Dermatologisch getestet*



PREMIUM GLEITMITTEL
MADE IN GERMANY





Für mehr Liebe, Lust & Leidenschaft

Ritex PREMIUM Gleitgel

Ritex Gleitgel ist ein Medizinprodukt zur Verbesserung der Gleitfähigkeit und zum Ausgleich mangelnder Vaginalfeuchtigkeit beim Intimverkehr.

Erotik unbeschwert genießen

Nach einer Schwangerschaft, bei Hormonumstellungen, in den Wechseljahren oder bei Stress kann es zu unzureichender natürlicher Feuchtigkeit im Vaginalbereich kommen. Ritex Gleitgel ergänzt die körpereigene Lubrikation, erhöht die Gleitfähigkeit und steigert das Lustempfinden. Ritex Gleitgel für ein gefühlvolles und intensives Liebesleben!

Beste Qualität – Sehr gute Verträglichkeit

Ritex Gleitgel enthält ausgewählte Rohstoffe bester Qualität. Die Hautverträglichkeit wurde von einem unabhängigen, anerkannten Institut in dermatologischen Tests* mit „Sehr Gut“ bewertet.

Gleitgel und Kondome

Ritex Gleitgel kann mit allen Ritex Kondomen verwendet werden. Einfach außen auf das bereits angelegte Kondom auftragen.

Hergestellt in Deutschland

Ritex Gleitgel wird mit modernster Technologie in Deutschland hergestellt und unterliegt regelmäßigen, strengen Qualitätskontrollen.

Gleitgel-Gebrauchshinweise

Ritex Gleitgel wird im Vaginal- oder Penisbereich aufgetragen. Tube nach Gebrauch verschließen.

Bei Kondomverwendung das Gleitgel auf die Außenseite des bereits über den Penis abgerollten Kondoms auftragen. Niemals zusätzliche Gleitmittel auf der Kondom-Innenseite (zwischen Kondom und Penis) verwenden, da hierdurch das Kondom leichter abrutschen oder reißen kann.

Sollten Unverträglichkeiten bei der Anwendung von Ritex Gleitgel auftreten oder generell mangelnde Lubrikation vorliegen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Gleitmittel können die Chance einer Befruchtung reduzieren. Wenn Sie schwanger werden wollen, empfehlen wir deshalb Ritex KINDERWUNSCH Gleitmittel.

Haltbarkeitsdatum (solange Tube ungeöffnet) und LOT Nr. siehe Boden der Faltschachtel und Tubenfalz.

Ingredients (INCI):

BIO: Glycerin, Aqua, Xanthan Gum, Lactic Acid.

GEL*: Aqua, Aloe Barbadensis, Glycerin, Propylene Glycol, Xanthan Gum, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid.

HYDRO: Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Sodium Lactate, Lactic Acid.

Meldehinweis: Schwerwiegende Vorkommnisse bei Verwendung des Produktes der zuständigen Behörde (Sitz des Anwenders/Patienten) melden.

Bitte beachten Sie auch die nachstehenden Hinweise-Symbole auf der Verpackung



Bitte beachten Sie die ausführlichen Hinweise auf diesem Beipackzettel.



Produkt zwischen 0 °C und 25 °C lagern.



Geöffnete Tube innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.



Medizinprodukt



Verfalldatum. Produkt nicht benutzen, wenn Verfalldatum überschritten.



Nummer der Produktcharge



Hersteller



Ritex GmbH
Gustav-Winkler-Straße 50
33699 Bielefeld · Germany

*Mehr Infos unter: www.ritex.de

